


Przygotowanie przesyłki dla kuriera krok po kroku

Przygotuj:

- Kartonowe lub plastikowe pudełko (A)
- Uzupełniony formularz zlecenia badania (B)
- Kopertę bąbelkową (C)
- Czarny marker lub flamaster (D)
- Kompres/gaza (E)
- Woreczek (F)

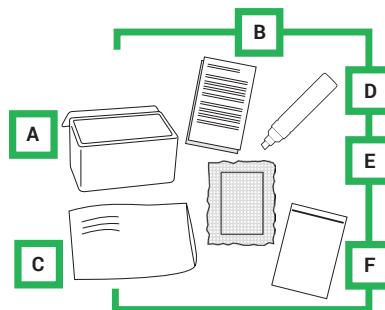


Ważne: Do badania nie przyjmujemy całych płodów!


1. Zakrętkę sterylnego pojemnika (z materiałem z poronienia w soli fizjologicznej) oklej dookoła taśmą klejącą, plastrem lub parafilmem, tak aby nie doszło do rozlania soli fizjologicznej.




2. Pojemnik z solą obłóż dookoła kompresem lub gazą. Następnie włóż do woreczka.

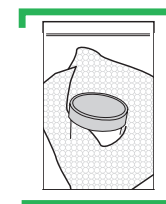

3. Zabezpieczony pojemnik umieść w sztywnym opakowaniu, np. małym kartonie lub plastikowym pudełku itp.

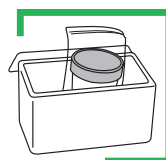


4. Wolne przestrzenie między opakowaniem a pojemnikiem wypełnij folią bąbelkową, watą lub papierem, aby uniknąć przesuwania pojemnika w czasie transportu. Przy wysokich temperaturach zalecamy włożenie wkładów chłodzących (są dostępne w aptekach).

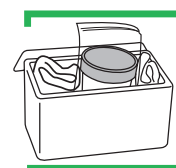

5. Do koperty bąbelkowej zapakuj:


- Kartonowe/plastikowe pudełko z materiałem w soli fizjologicznej
- Formularz zlecenia badania

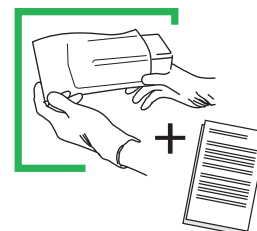

6. Zaadresuj kopertę:

Laboratorium testDNA
ul. Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice
oraz napisz dużymi literami informację dla kuriera:

UN3373 Biological Substance Category B.

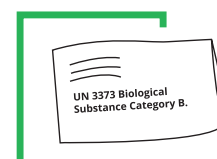

7. Tak zapakowaną przesyłkę przekazaj kurierowi.

